


PROCÉDURE DE MISE À JOUR


Element RC

Une clé USB vierge est nécessaire pour réaliser cette procédure.

1. Connectez-vous au site Internet www.scilvet.fr
Accédez à la page produit de l'analyseur **Element RC** puis à l'onglet « **Téléchargement** ».
2. Téléchargez le fichier « **1.00.01.44.zip** ».
3. Créez un dossier « **upgradepackage** » sur une clé USB vierge.
4. Déplacez le fichier « **1.00.01.44.zip** » que vous avez téléchargé à l'intérieur du dossier « **upgradepackage** ».
5. Insérez la clé USB dans le port USB du bas situé à l'arrière de l'analyseur **Element RC** (hors tension).
6. Allumez l'analyseur **Element RC**.
7. Après détection de la clé USB, sélectionnez « **ok** » pour lancer la mise à jour.

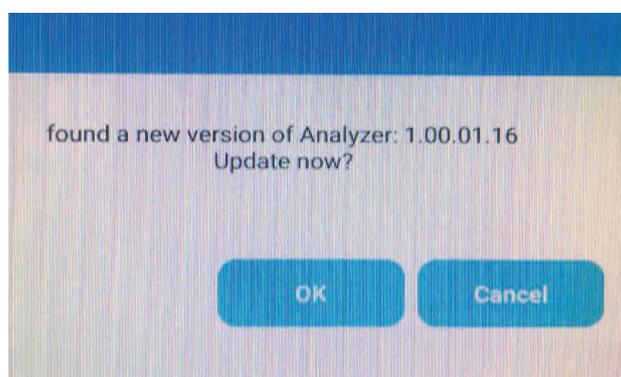

8. Après la mise à jour complète de l'analyseur, **retirez la clé USB** puis redémarrez l'analyseur **Element RC**.

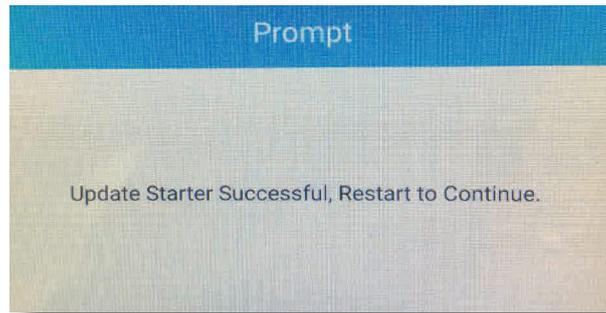

9. Vérifiez la version installée (le numéro s'affiche à l'ouverture de l'écran principal).

**Une question ?
Contactez notre service technique au 03.90.20.16.41 !**