



# GUIDE RAPIDE D'UTILISATION

scil Vet SA

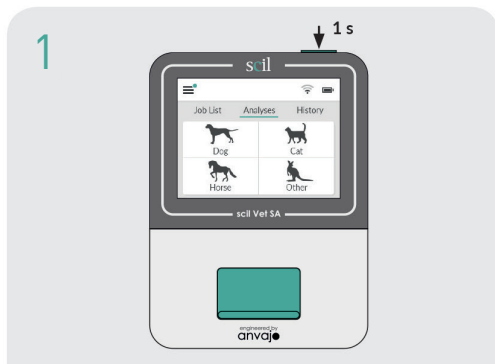


Avant la première utilisation : s'assurer que l'appareil soit connecté à une source d'alimentation appropriée via le bloc d'alimentation fourni.

1. Appuyer sur le bouton on/off pendant 1 seconde.
2. Attendre que l'appareil soit allumé.
3. Sélectionner l'espèce animale souhaitée.

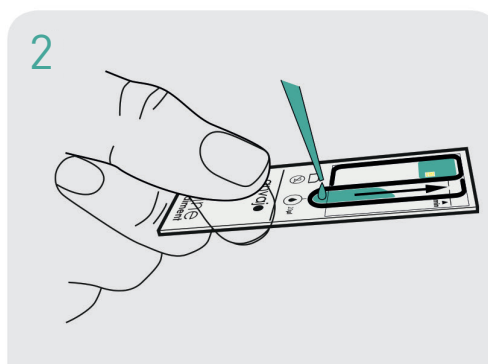

1. Tenir la lame comme indiqué ci-dessus.
2. A l'aide de la pipette fournie, ajouter **20 µL** d'échantillon dans le puit d'échantillonnage.
3. Déposer l'échantillon jusqu'à ce qu'il atteigne la ligne repère.  
Remarque : s'assurer que rien ne touche la zone d'échantillonnage (*doigts, chiffon, etc...*).

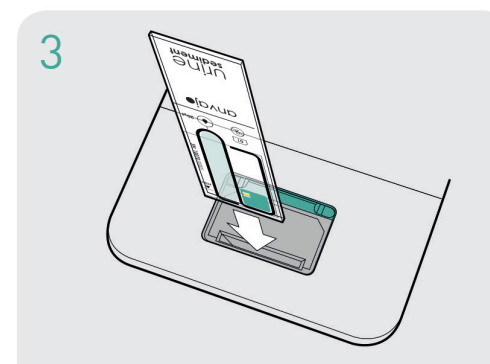

1. Ouvrir la porte d'analyse.
2. Introduire la lame dans la fente. Le carré vert doit être positionné vers le côté droit de l'appareil.
3. Lancer l'analyse.



1. La mesure prend 1 à 4 minutes.
2. Affichage de l'ensemble des résultats sur l'écran de l'analyseur.
3. Pour consulter le détail des résultats, appuyer sur le paramètre souhaité.