

## ► TESTS RAPIDES scil



### CHIENS ET CHATS

#### scil v-Giardia

Détecte les antigènes de *Giardia intestinalis*.

#### scil v-ParCoGia

Détecte les antigènes des Parvovirus, Coronavirus et *Giardia intestinalis*.

#### scil v-Parvo

Détecte les antigènes des Parvovirus.



### CHIENS

#### scil v-Diro

Détecte les antigènes des vers adultes *Dirofilaria immitis*.

#### scil v-Ehrlichia

Détecte les anticorps dirigés contre *Ehrlichia canis*.

#### scil v-Leishmania

Détecte les anticorps dirigés contre *Leishmania*.




### CHATS

#### scil v-RetroFel

Détecte l'antigène p27 du FeLV et les anticorps dirigés contre la protéine p15E du FeLV, ainsi que les anticorps dirigés contre les protéines p24 et gp41 du FIV.

#### scil v-FeLV-FIV

Détecte l'antigène p27 du FeLV et les anticorps dirigés contre les protéines p24 et gp41 du FIV.

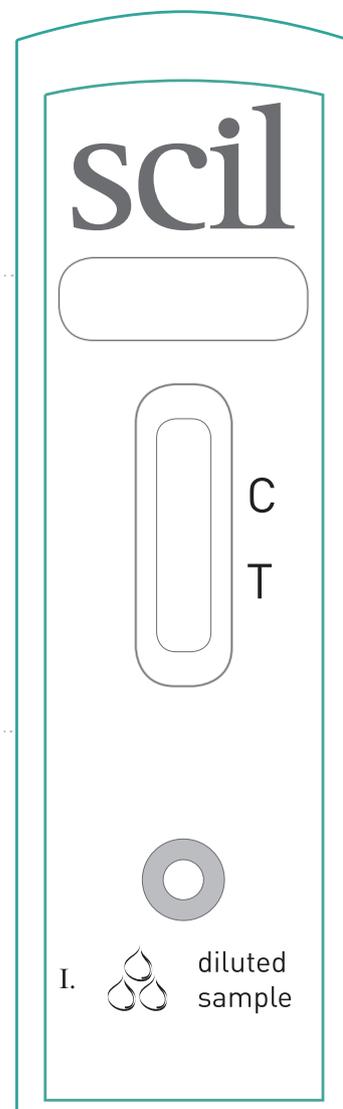

UNIQUE

UNIQUE



scil animal care company

Parc Activeum - 3 rue Jacqueline Auriol - 67 120 Altorf - Tél : +33 (0)3 90 20 16 40 - Fax : +33 (0)3 90 20 16 45

E-mail : frmarketing@scilvet.com

www.scilvet.fr

# scil v-Diro

RAPIDE - PRÉCIS - SIMPLE

Détecte les antigènes des vers adultes  
*Dirofilaria immitis*




# scil v-Diro

## ► INFORMATIONS

La dirofilariose canine est une maladie chronique due à une infestation par les larves et vers adultes de *Dirofilaria immitis*. 6 à 7 mois après l'infestation, les vers femelles et mâles adultes apparaissent et peuvent être spécifiquement détectés par le test scil v-Diro. Le tableau clinique de la maladie varie selon les chiens touchés. Les formes légères peuvent être asymptomatiques mais les patients

plus sévèrement atteints peuvent présenter des maladies respiratoires et cardiovasculaires. Le parasite est enzootique dans de nombreuses régions tropicales et subtropicales. Pour cette raison un traitement prophylactique régulier est nécessaire pour les chiens ainsi qu'un dépistage infectieux avec le test v-Diro.

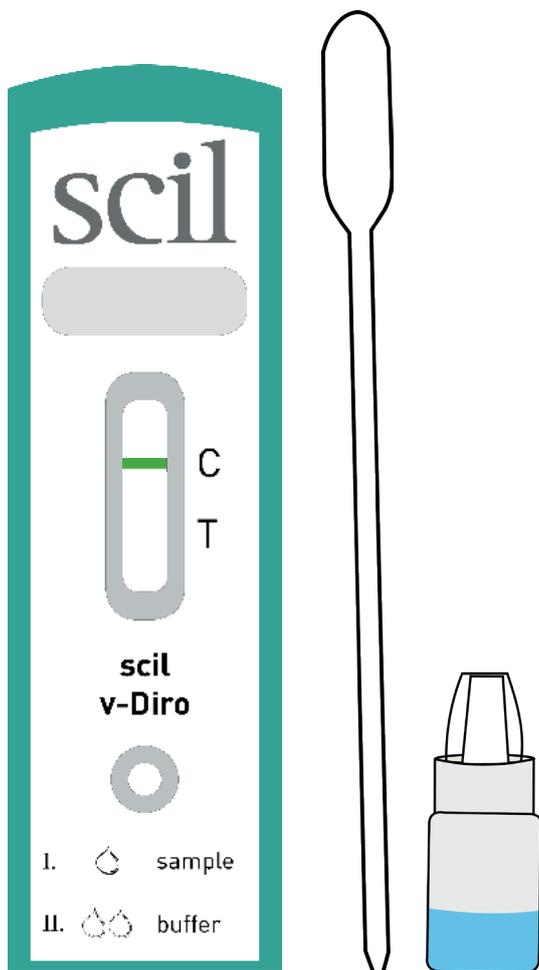

## ► COMPOSANTS

- » Cassette scil v-Diro
- » Pipette
- » Flaçon à réactif

Avant l'utilisation du test, la zone réactive présente une ligne verte dans la zone de ligne témoin. C'est un indicateur témoin de qualité qui disparaîtra lors de la phase de lavage.

## ► PERFORMANCES

	Sensibilité	Spécificité	Référence	n
<b>Dirofilaria</b>	96.67 %**	99.99 %	ELISA*	84


\*Enzyme-linked Immunosorbent Assay (essai d'immuno-absorption enzymatique)

\*\*Test Knott

## ► PROCÉDURE


### Étape 1 :

- A. Prélevez l'échantillon avec la pipette.
- B. Déposez avec précaution une goutte (30 µL) de l'échantillon dans le puits d'échantillonnage.

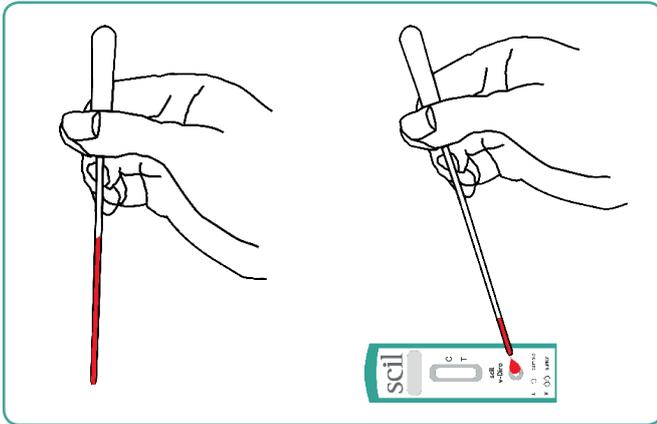

### Étape 2 :

- Ajoutez deux gouttes de réactif du flacon dans le puits d'échantillonnage.

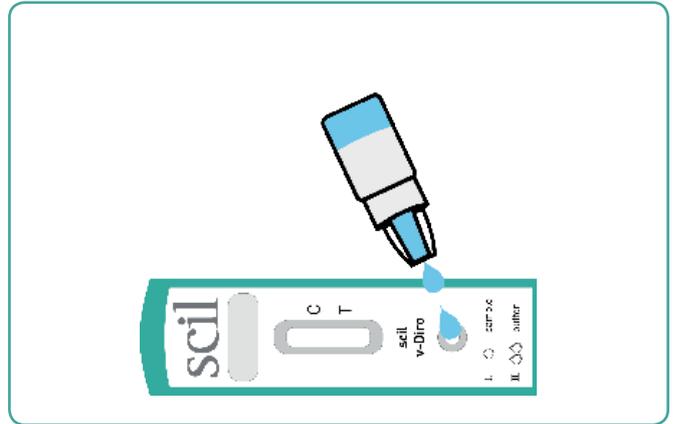

## ► ÉVALUATION

Lecture du résultat après 10 minutes.

Une ligne rouge/bleue dans la région T de la zone réactive indique un résultat **positif**.  
L'absence de la ligne C du contrôle rend le test invalide.

