

Retrouvez tous
les supports de
l'analyseur ici :POUR
LES TESTS
trūRapid

trūRapid Reader

LECTEUR DE TESTS RAPIDES


GUIDE RAPIDE D'UTILISATION

TESTS
IMMUNOLOGIQUES

AN ANTECH COMPANY

DÉMARRAGE


1. Appuyez sur le bouton situé à l'avant de l'appareil pour le démarrer.
2. Lorsque l'écran de connexion apparaît, saisissez le nom d'utilisateur : **OPERATOR** et le mot de passe : **pwd**.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

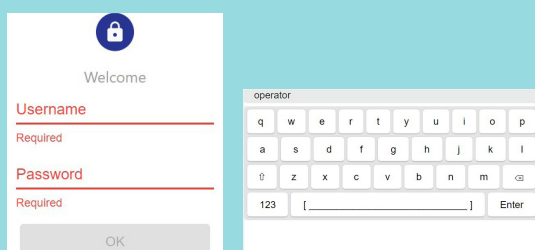

RÉALISATION D'UNE ANALYSE

> Sélection du **TYPE DE CASSETTE**

1. Appuyez sur et cliquez sur **RÉGLAGE DES CASSETTES**.

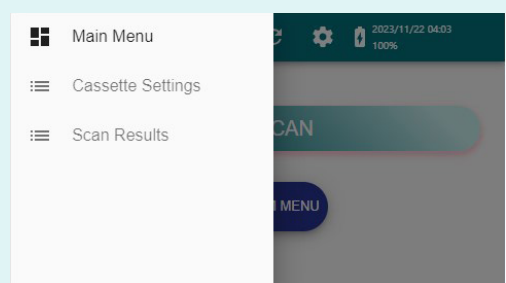


2. Sélectionnez un type de cassette disponible dans la liste et appuyez sur la touche **SÉLECTIONNER COMME ACTUEL** pour charger les réglages de cassette.

NOTE :

Vérifiez si les paramètres de la cassette indiqués sur la barre supérieure correspondent à votre test : si c'est le cas, ignorez cette étape.

Name	Code	Batch	RESTORE
TruRapid_CPV_GIA	36	test batch	SELECT AS CURRENT
Tru Rapid 1 Strip	4	test batch	SELECT AS CURRENT
Tru Rapid 2 Strips	2	test batch	SELECT AS CURRENT

3. Appuyez sur **NOUVELLE LECTURE**.
4. Saisissez un ID d'échantillon.
5. Déposez l'échantillon dans le puits de la cassette puis 2 à 3 gouttes de solution tampon conformément aux instructions d'utilisation.
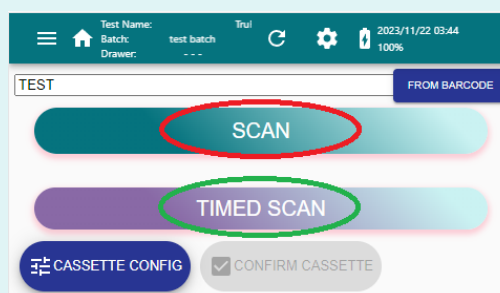
> Sélection du **MODE LECTURE**

Option LECTURE DIFFÉRÉE (recommandée)


Insérez la cassette et appuyez sur le bouton **LECTURE DIFFÉRÉE** (10 min.) afin que le trūRapid Reader incube et scanne automatiquement la cassette après 10 minutes. Un compte à rebours s'affiche jusqu'au début de la numérisation.

Option LECTURE IMMÉDIATE


Attendez 10 minutes après avoir déposé l'échantillon dans la cassette, insérez la cassette dans le lecteur et appuyez sur le bouton **LECTURE IMMÉDIATE**.

NOTE :

Un message d'alerte s'affiche si la cassette n'a pas été correctement insérée.
> Pour une cassette dotée d'une seule fenêtre de migration, utilisez l'adaptateur pour l'insérer.
> Pour une cassette dotée de plusieurs fenêtres de migration, insérez la cassette telle quelle.

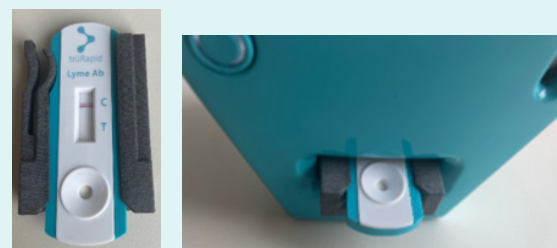

Les boutons **LECTURE IMMÉDIATE** et **LECTURE DIFFÉRÉE** restent grisés tant qu'un ID d'échantillon valide n'a pas été saisi et que la cassette n'a pas été correctement insérée.

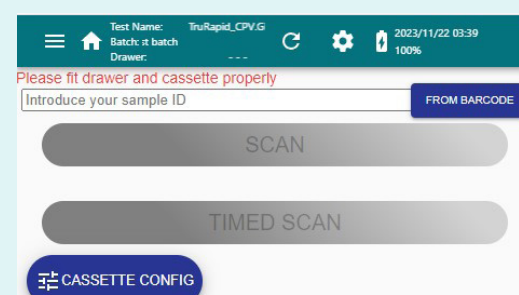


LECTURE DES RÉSULTATS

À la fin du scan, les résultats s'affichent automatiquement.

- Appuyez sur les différents onglets pour parcourir toutes les données de résultats.
- Vous pouvez accéder à la liste complète des résultats en appuyant sur **RÉSULTATS D'ANALYSE** depuis le menu .

Sélectionnez un résultat de la liste puis appuyez sur les options ci-dessous :
IMAGES = scan de la cassette.
NOM DU TEST = résultats.
COMMENTAIRES = ajout d'informations.

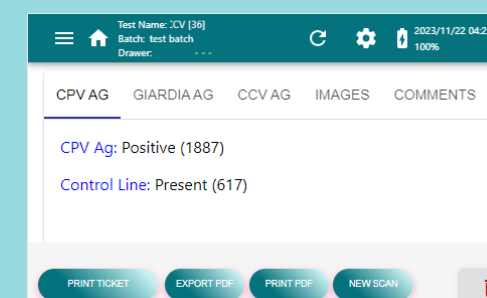

EXPORTATION DES RÉSULTATS

Pour exporter les résultats au **format PDF**, insérez une clé USB vierge et appuyez sur **EXPORTER LE PDF**.

MAINTENANCE

Pour nettoyer le trūRapid Reader

Utilisez un chiffon légèrement humidifié ou un chiffon antistatique avec une dilution de 70 % d'éthanol ou de 10 % d'eau de Javel.

Pour nettoyer l'adaptateur

Utilisez un chiffon légèrement humide ou un chiffon antistatique dilué à 70 % dans de l'éthanol ou à 10 % dans de l'eau de Javel.

NOTE :

Ne touchez pas l'intérieur de l'appareil ou la fente d'insertion de la cassette avec le chiffon. Cela pourrait endommager l'appareil.

MISE HORS TENSION

Appuyez sur le bouton situé à l'avant de l'appareil.

NOTE :

Après 30 minutes d'inactivité, l'appareil s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie.